

# 補助プレート

品番：DSSMP-HP

## 取扱説明書

保管用

- 本製品は「独立宣言スマートプラス」専用の補助プレートです。ほかの用途への使用はできません。
- 「独立宣言スマートプラス」を畳やカーペットなどのやわらかい床の上で使用すると、回転操作がしづらくなります。補助プレートをご利用いただくことで、操作がしやすくなります。また、床面への影響（へこみやあとがつく）を防止できます。

### 仕様

サイズ	補助プレート 1100(幅)×850(奥行) ×3(厚み)mm
	ズレ防止テープ 1000(長さ)×50(幅)mm


### 品質表示

材質	補助プレート ポリカーボネート
	ズレ防止テープ 不織布

### 内容

① 補助プレート

② ズレ防止テープ×2枚

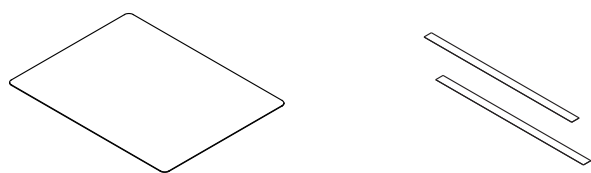

### 使用方法

- ① 補助プレートのフィルム（両面）をはがします。
- ② ズレ防止テープのはく離紙（片面）をはがして、補助プレートに貼付けます。（右図参照）
- ③ 補助プレートを専用マットの中央に貼付けます。（専用マットの表面が硬くなっている側に貼付けてください）
- ④ 専用マットが上になるように床に敷き、「独立宣言スマートプラス」を設置します。




※ 「独立宣言スマートプラス」を設置する際は、右下の図を目安にしてください

※ 設置後は必ず回転操作（180° 全域）を行い、前輪が補助プレートからはみ出さないことを確認してください。



注意

- ※ お手入れの際は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- ※ 温度や湿度によって収縮する場合があります。
- ※ 端面で手や指などを傷つけないように注意してください。

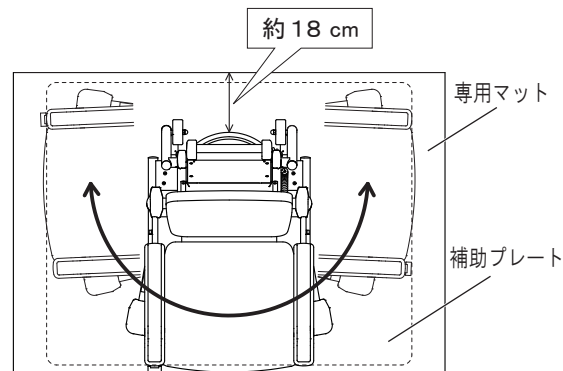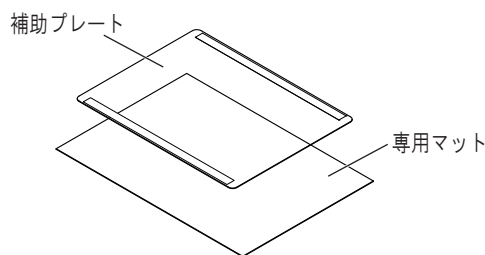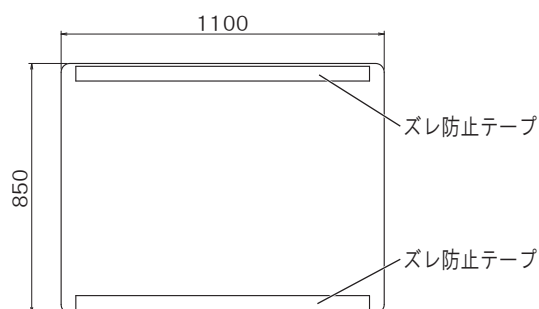

- 本製品の機能を十分ご理解いただき、安全にご使用いただくために、この取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は大切に保管し、必要なときお読みください。